

OXIVIR PLUS SPRAY

Detergent dezinfectant lichid cu spectru larg, adecvat și pentru dispozitive medicale

Descriere

Oxivir Plus Spray de la Diversey este **un agent de curățare și dezinfectant lichid cu spectru larg**, gata de utilizare, prevăzut cu pulverizator, pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure neporoase, echipamente și dispozitive medicale și a anumitor articole de îmbrăcăminte delicate.

Proprietăți cheie

- Bazat pe o tehnologie patentată: formulă acidă pe bază de peroxid de hidrogen
- Eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme incluzând bacterii, virusuri, fungi și levuri. Curăță și dezinfectează într-un singur pas.
- **Exclusiv pentru uz profesional**
- Timpuri de contact scurte
- Agent de curățare eficient
- Fără parfum

Avantaje

- Curăță și dezinfectează într-un singur pas, reducând timpul de lucru
- Dezinfectare cu spectru larg testată conform normelor europene împotriva a numeroși agenți patogeni: HIV, HBV, HCV, gripa aviară, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella enterica*, MRSA, VRE și Norovirus
- Performanță de curățare excelentă, inclusiv detartrare și prevenirea formării depunerilor de calcar
- Profil bun de siguranță pentru utilizator
- Profil ecologic bun. Se descompune în oxigen și apă
- Potrivit pentru utilizare în zone de risc din domeniul medical, inclusiv săli de operații, unități de terapie intensivă, unități de terapie intensivă neonatală și saloanele pacienților

Aplicare

Dozare: A se utilizat nediluat

Spray de curățare și dezinfectare. Aplicare într-un singur pas:

1. Îndepărtați murdăria consistentă ușor de eliminat.
2. Pulverizați pe suprafețele de curățat
3. Lăsați să acționeze cel puțin 5 minute și ștergeți cu o cârpă curată până la uscarea suprafeței.

Notă: Pentru dezinfectarea împotriva norovirusului, pre-curățați suprafața înainte de dezinfectare. Permiteți suprafeței să rămână umedă timp de două minute.

Important: A nu se amesteca cu alte produse. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la acizi. Produsul nu este destinat utilizării pe dispozitive medicale invazive.

Aspect și caracteristicile de bază ale produsului:

Aspect: Lichid incolor, transparent

SIGUR PENTRU
LÂNĂ



pH – valoare în utilizare:	1,8
Densitate:	1.00 g/cm ³ (20°C)
Solubilitate în / Miscibilitate cu Apa:	Miscibil
Proprietăți oxidante:	Neoxidant.

Datele de mai sus vizează producția obișnuită și nu trebuie considerate specificații.

Fișă cu date de securitate disponibilă, la cerere, pentru utilizatorii profesioniști.

Manipulare și depozitare în condiții de siguranță: Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. A se păstra în recipientul original închis ermetic. A se evita temperaturile extreme. Nu amestecați cu alte produse. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Reacționează în contact cu substanțele oxidabile. Reacționează cu alcalii. A se feri de produse care conțin agenți de înălbire pe bază de clor ori sulfiți. A nu se inspira gazele, vaporii, spray-ul sau aerosolii. Se va folosi numai în zone bine ventilate. Se va evita contactul cu ochii. Se va evita formarea de aerosoli. **Metode de eliminare a deșeurilor:** Deșeurile se vor elimina în conformitate cu regulamentele naționale și locale. **Deșeuri de produs:** Conținutul concentrat sau ambalajul contaminat trebuie eliminat de o companie autorizată sau conform reglementărilor locale. Eliminarea deșeurilor în canalizare nu este recomandată. Materialul ambalajelor curățate este potrivit pentru generarea de energie sau pentru reciclare conform reglementărilor naționale. Asigurați predarea acestora către companiile autorizate pentru colectarea, transportul, recuperarea și eliminarea deșeurilor. **Cod de deșeuri:** 20 01 30 - detergenți alții decât cei specificate la 20 01 29. **Descrierea măsurilor de prim ajutor:** **Contact cu pielea** Clătiți pielea cu apă caldă din abundență, sub jet care curge ușor. În caz de iritare a pielii, consultați medicul. **Contact cu ochii** Se va clăti imediat cu foarte multă apă timp de mai multe minute. Dacă se produce iritare se contactează medicul. **Inhalare** Îndepărtați de sursa de expunere. Dacă disconfortul persistă, adresați-vă medicului. **Ingerare** Îndepărtați materialul din gură. Beți imediat 1-2 pahare cu apă sau lapte. În cazul înghițirii unor cantități mari sau dezvoltarea simptomelor, solicitați îngrijire medicală. **Auto-protecție a persoanei ce acordă primul ajutor:** Purtați echipament individual de protecție cum este indicat în subsecțiunea 8.2 din FDS. **Simptome și efecte principale, atât acute cât și ulterioare:** Inhalare: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare. Contact cu pielea: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare. Contact cu ochii: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare. Ingerare: Nu prezintă efecte sau simptome în condiții normale de utilizare.

Compatibilitatea produsului: Utilizat conform recomandărilor, **Oxivir Plus Spray** poate fi aplicat pe majoritatea materialelor obișnuite.

Informații de mediu: Surfactanții utilizați în acest produs sunt biodegradabili în conformitate cu cerința Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind Detergenții.

Date microbiologice: Eficiență dovedită în conformitate cu standardele EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 și EN13727.

Substanțe active: Peroxid de hidrogen 2,8 g/kg (CAS 7722-84-1), Acid salicilic 1,1 g/kg (CAS 69-72-7).

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

Aprobat de Ministerul Sănătății al României: **Aviz Nr. 3039BIO/02/12.24**

Dimensiuni disponibile ale ambalajului

Cod articol	Dimensiune ambalaj	Tip ambalaj
100837681	6x0,75L	Flacoane cu pulverizator

Distribuitor: DIVERSEY ROMANIA SRL, Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21 etaj 7, Baneasa Business Center sector 1, cod postal 013682, tel: +4 021 233 38 94, www.diversey.com